

Vial-Mate Concept


Antibiotika klar til blanding i et helt lukket system

Baxter


Aktivering og blanding

Start med å feste infusjonssettet til posen. Fyll det med infusjonvæske før du starter aktivering og blanding av antibiotika.


Aktivering

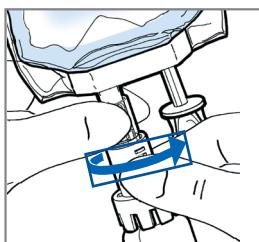


1. Hold fast i stemelet og skru basen med pilen for å åpne adapteren.

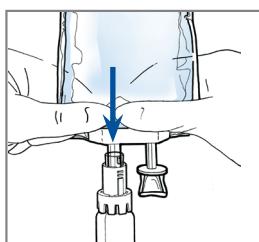

2. Sett hetteglasset på benken. Hold på den harde delen av Viafloposen og trykk ned stemelet i basen til det høres et "klikk".

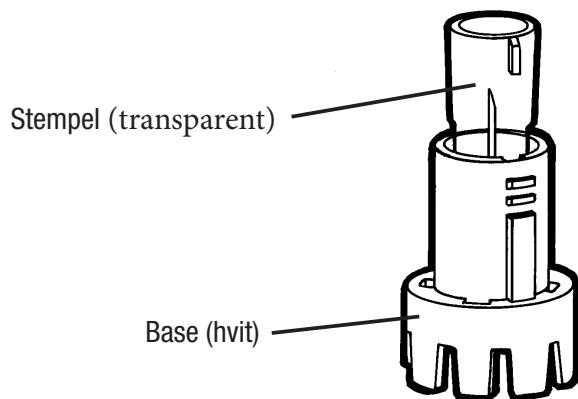


Blanding

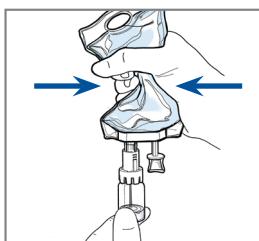

3. Klem posen slik at oppløsningsvæsken presses inn i hetteglasset til dette er halvfullt.



4. Rist for å blande løsningen. Hold samtidig i både posen og basen.

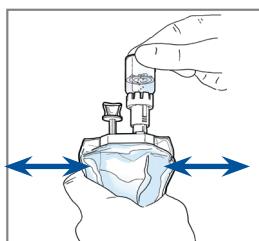


5. Hold posen opp ned. Klem for å presse oppløsningen tilbake til Viafloposen.

Avslutning



6. Avslutt ved å holde i posens henger og adaptørens base. Dra deretter ut stemelet av basen.

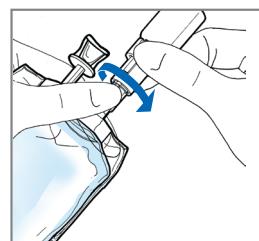

7. Hold i stemelet og vri basen i pilens retning for å låse systemet.

Infusjonssettet må aldri kobles fra adapteren. Kastes i sin helhet etter bruk.


REFERANSER:

- 1) Koblet antibiotika vs manuel antibiotika, Syddansk Sundhedsinnovation, November 2015 <https://www.syddansk sundhedsinnovation.dk/projekter/afsluttede-projekter/klar-til-brug-lægemidler-erstatter-manuel-håndtering-af-risikobetonet-medicin/2018-10-10>, 2) Stability review docked Vial-Mate. Baxter data on file available on request.
- 3) Preparatomtale Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 4) Lannoy et al Comparison of container system residual volumes and the implications for medical error Eur J Hosp Pharm 2012 19: 360-363

Baxter

Baxter AS
Postbox 70 Nydalen, 0409 Oslo /
Gjerdrumsvei 11
T 22 58 48 00 F 22 58 48 01
www.baxter.no

Vial-Mate Concept

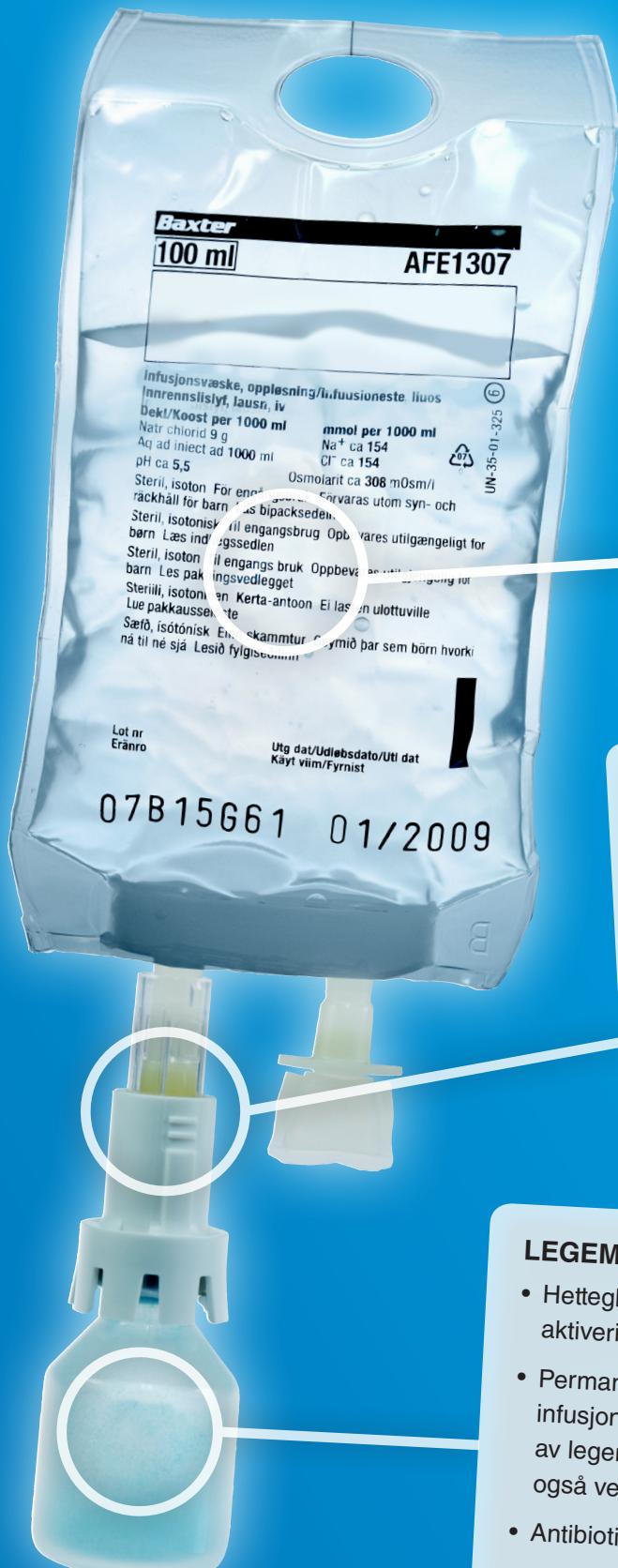

VIAFLO INFUSJONSPPOSE³

- Lavt residualvolum: pasienten får hele den ordinerte dosen⁴
- Harde porter: permanent tilkobling til VIAL-MATE adapter
- Høyt tilsetningsvolum: enkel tilberedning

VIAL-MATE ADAPTER

- Lukket system
- Ferdigkoblet system som aktiveres hos pasienten
- Nålbeskyttet system som forhindrer stikkskader
- Passer til hetteglass med 20 mm flaskehals

LEGEMIDDEL

- Hetteglasset perforeres ikke før aktivering og tilberedning
- Permanent kobling til infusjonsposen: sikker identifisering av legemiddelet og et lukket system også ved avfallshåndtering
- Antibiotika etter deres behov



Antibiotikadoser klar for blanding i et lukket og sikkert system

Gir et tryggere og mer effektivt arbeidsmiljø

Vial-Mate Concept er et lukket system for intravenøs antibiotika som leveres ferdigkoblet til avdelingen. Systemet kan med enkelhet aktiveres hos pasienten. Vial-Mate Concept er et nålbeskyttet system som forhindrer stikkskader. Det ferdigkoblet systemet reduserer risikoen for feilmedisinering og sikrer riktig legemiddel i rett oppløsning.¹ Infusjonssystemet kastes i sin helhet etter bruk.

Sikker legemiddelshåndtering

Ved å bruke et ferdigkoblet system som Vial-Mat Concept reduseres risikoen for kontaminasjon og feilmedisinering.¹ Systemet er koblet sammen i en steril produksjon. Hvert enkelt sett er sporbart og tydelig merket, og kan implementeres i lukket legemiddelsløyfe.

Ett års holdbarhet

Vial-Mate Concept har ett års holdbarhet i romtemperatur.²

Enkelt og praktisk

Den enkle og raske håndteringen av koblingen minimerer tilberedningstiden og frigir dermed mer tid hos pasienten. Den lange holdbarheten i romtemperatur skaper forutsigbarhet ved lagerhold.